



**Инструкция по применению
Пессарии силиконовые примерочные:
малые; средние; большие**



Инструкция по применению

Пессарии силиконовые примерочные: малые; средние; большие

Описание

Комплект пессариев силиконовых примерочных состоит из 4 пессариев в форме кольца – разного диаметра. Изготавливаются пессарии из эластичного биологически инертного медицинского силикона. Свойства материала не изменяются в широком температурном диапазоне (от -60°C до $+200^{\circ}\text{C}$), материал устойчив к воздействию кислот и щелочей.

В комплект пессариев силиконовых примерочных малых входят пессарии силиконовые: кольцо диаметром 50, 55, 60, 65 мм.

В комплект пессариев силиконовых примерочных средних входят пессарии силиконовые: кольцо диаметром 65, 70, 75, 80 мм.

В комплект пессариев силиконовых примерочных больших входят пессарии силиконовые: кольцо диаметром 85, 90, 95, 100 мм.

Размер кольца указан на изделии.

Показания

Индивидуальный подбор размера пессария для коррекции пролапса гениталий.

Изделие не предназначено для лечения.

Предостережения:

- установка пессария возможна при 1-2 степени чистоты влагалища;
- пессарий поставляется нестерильным, перед использованием требуется предстерилизационная очистка, дезинфекция, стерилизация;
- необходимо проводить предстерилизационную очистку (ПСО), дезинфекцию и стерилизацию после каждого использования пессария. ПСО, дезинфекция и стерилизация должны проводиться согласно действующим нормативным документам для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь для учреждений здравоохранения.
- свойства материала позволяют многократно дезинфицировать и стерилизовать изделие.

Условия хранения:

- изделие должно храниться при температуре от +5 °С до +40 °С, в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей;
- срок годности (хранения) пессариев в упакованном виде составляет не более 5 лет;
- рекомендуемый срок использования пессария после вскрытия упаковки составляет не более 2 лет;
- не применять после истечения срока годности (хранения) и срока использования;
- хранить в недоступном для детей месте;
- после истечения срока использования, а также непригодные к использованию изделия подлежат утилизации. Утилизация выполняется согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к утилизации отработанных медицинских изделий.

Введение пессария

Перед введением пессария опущенные/выпавшие органы должны быть возвращены в анатомически правильное положение.

Пессарий извлекают из упаковки (рис. 1). После дезинфекции изделие смазывают небольшим количеством мази, разрешенной к применению в гинекологической практике. Пессарий сжимают и в сжатом виде вводят во влагалище (рис. 2). Затем его разворачивают таким образом, чтобы шейка матки располагалась в отверстии пессария (рис. 3).

При верно подобранном размере примерочного пессария последний должен располагаться в кософронтальной плоскости между самой глубокой точкой влагалища и верхним краем симфиза.

Для извлечения пессария необходимо захватить изделие пальцами, слегка сжать и в сжатом состоянии извлечь из влагалища. Благодаря эластичным свойствам силикона дискомфорт пациентки при введении/извлечении пессария минимален.

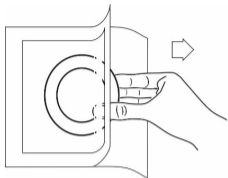


Рисунок 1

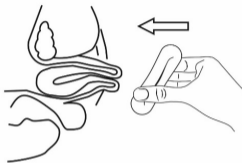


Рисунок 2



Рисунок 3

Применение примерочных колец позволяет определить емкость влагалища и размер лечебного pessaria (табл. 1).

Таблица 1 – Выбор размера силиконового пессария

Пессарий силиконовый примерочный, наружный диаметр, мм	Пессарий силиконовый чашечный и пессарий силиконовый чашечный перфорированный, наружный диаметр, мм	Пессарий силиконовый: толстое кольцо и пессарий силиконовый: кольцо, пессарий урогенитальный доктора Журавлева: сферический*, наружный диаметр, мм	Пессарий силиконовый: цервикальный, наружный диаметр, мм	Пессарий силиконовый: кубический и пессарий силиконовый кубический перфорированный, размер грани, мм	Пессарий силиконовый уретральный, наружный диаметр, мм	Пессарий силиконовый грибовидный, наружный диаметр, мм	Пессарий силиконовый: Ходжа, наружный диаметр, мм	Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный, наружный диаметр, мм
50	-	50	-	-	45; 50	50	-	45; 50
55	55	55	-	-	55	55	55	55
60	60	60*	65	29	60	60	60	60
65	65	65*	65	32	65	65	65	65
70	70	70*	70	37	70	70	70	70
75	75	75*	70	41	75	75	75	75
80	80	80	70	45	80	80	80	80
85	85	85	-	-	85	85	85	85
90	90	90	-	-	90	90	90	90
95	95	95	-	-	95	-	-	95
-	-	100	-	-	100	-	-	100

Выбор типа пессария

Выбор типа пессария зависит от анатомических особенностей пациентки, степени пролапса и наличия или отсутствия сопутствующих расстройств мочеиспускания (табл. 2).

Таблица 2 – Выбор типа пессария

Тип пессария	Клиническая классификация смещения влагалища и матки (система Baden–Walker)
Пессарии силиконовые: кольцо, толстое кольцо, пессарий силиконовый гинекологический универсальный	I степень – опущение на половину расстояния до девственной плевы
Пессарии силиконовые: уретральный, чашечно-уретральный, пессарий силиконовый гинекологический универсальный	I степень – опущение на половину расстояния до девственной плевы, осложненное нарушением мочеиспускания

Пессарии силиконовые: толстое кольцо, чашечный, чашечный перфорированный, пессарий силиконовый гинекологический универсальный	II степень – опущение до девственной плевы
Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный, пессарий силиконовый гинекологический универсальный	II степень – опущение до девственной плевы, осложненное нарушением мочеиспускания
Пессарии силиконовые: грибовидный, Ходжа, кубический, кубический перфорированный, цервикальный перфорированный, пессарий урогенитальный доктора Журавлева: сферический	III степень – ниже девственной плевы на половину расстояния до девственной плевы

<p>Пессарии силиконовые: грибовидный, Ходжа, цервикальный перфорированный, пессарий урогенитальный доктора Журавлева: сферический</p>	<p>III степень – ниже девственной плевы на половину расстояния до девственной плевы, осложненное нарушением мочеиспускания</p>
<p>Пессарии силиконовые: грибовидный, Ходжа, кубический, пессарий кубический перфорированный, цервикальный перфорированный, пессарий урогенитальный доктора Журавлева: сферический</p>	<p>IV степень – полное выпадение</p>
<p>Пессарий силиконовый: грибовидный, кубический, пессарий кубический перфорированный, цервикальный перфорированный, пессарий урогенитальный доктора Журавлева: сферический</p>	<p>IV степень – полное выпадение, осложненное нарушением мочеиспускания</p>

При широком входе во влагалище (более 5 см / 3 поперечных фаланги) риск экспульсии кольцеобразных моделей пессария возрастает.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Симуург»
пр-т Генерала Людникова, 13, комната 413,
210023, г. Витебск, Республика Беларусь,
тел.: +375 (212) 62 32 33



Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 30.04.2024
0241517202208

