

Руководство по эксплуатации Зонд «Юнона»: цитощетка со шпателем

ОПИСАНИЕ: зонд состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки: цитощетка и шпатель. Шпатель выполнен в виде плоской лопатки с закругленными краями. Цитощетка представляет собой стержень с множеством эластичных щетинок, расположенных по винтовой линии перпендикулярно оси стержня. Насадка зонда – цитощетка применяется для забора материала из цервикального канала, насадка зонда – шпатель применяется для забора материала (мазок или соскоб) с поверхности шейки матки или со слизистой влагалища. Зонд поставляется стерильным и готовым к использованию.

ПОКАЗАНИЯ: забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не имеется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


Недопустимо повторное применение зонда.
Недопустимо применение зонда при нарушении целостности конечной (стерилизационной) упаковки.
Недопустимо применение зонда при превышении срока годности, указанного на упаковке.
Применять зонд необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ


Забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
2. Слегка прижав шпатель к слизистой выполнить 1 – 3 оборота.

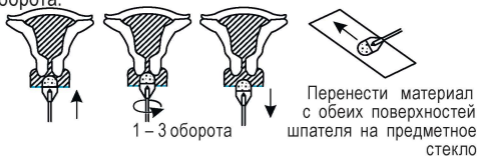

3. Затем ввести в цервикальный канал цитощетку и выполнить один оборот.

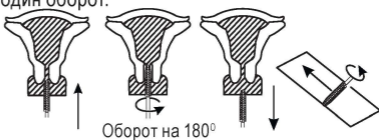

4. Собранный на рабочих частях зонда материал перенести на предметное стекло или на среду для микробиологических исследований.

5. Использованный зонд после дезинфекции подлежит утилизации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
пр-т Людникова, 13-413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023
тел.: +375 (212) 62-32-33



Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com