

# Руководство по эксплуатации Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном

## ОПИСАНИЕ

Зонд состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки: тампон и цитощетка. Цитощетка представляет собой стержень с множеством эластичных щетинок, расположенных по винтовой линии перпендикулярно оси стержня. Тампон изготовлен из гигроскопичного материала. Насадка зонда – цитощетка применяется для забора материала из цервикального канала. Насадка зонда – тампон применяется для удаления избытка выделений (слизь, кровь и т.п.) перед применением цитощетки или для нанесения на поверхность слизистой жидкой или мазевой лекарственной формы (обработка шейки матки раствором Люголя при выполнении расширенной кольпоскопии и т.п.). Возможно применение тампона при заборе материала для приготовления мазка-отпечатка. Зонд поставляется стерильным и готовым к использованию.

**ПОКАЗАНИЯ:** Забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований, нанесение на слизистую жидкой или мазевой лекарственной формы.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Недопустимо повторное применение зонда. Недопустимо применение зонда при нарушении целостности конечной (стерилизационной) упаковки. Недопустимо применение зонда при превышении срока годности, указанного на упаковке. Применять зонд необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

## МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения:

1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.

2. Тампоном удалить избыток слизи.

3. При заборе материала

для приготовления мазка-отпечатка следует на короткое время прижать тампон к участку слизистой.

Собранный на тампоне материал перенести на предметное стекло.

4. Ввести в цервикальный канал цитощетку и выполнить один оборот.

5. Собранный цитощеткой

материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.

6. Для нанесения на слизистую раствора или мази необходимо предварительно нанести ее на тампон. Затем с помощью тампона обрабатывают участок слизистой.

7. Использованный зонд после дезинфекции подлежит утилизации.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Медицинское предприятие Сатург»  
пр-т Людникова, 13-413, г. Витебск,  
Республика Беларусь, 210023  
тел.: +375 (212) 62-32-33



Медицинское предприятие  
**Сатург**  
www.simurg-mp.com