

Руководство по эксплуатации Зонд «Юнона»: урогенитальный

ОПИСАНИЕ

Зонд состоит из ручки, на одном из концов которой размещена насадка урогенитальная. Насадка представляет собой оребренный по винтовой линии стержень из эластичного материала. Применяется для забора материала из уретры для последующих бактериологических исследований. Зонд поставляется стерильным и готовым к использованию.

ПОКАЗАНИЯ

Забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не имеется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Недопустимо повторное применение зонда.

Недопустимо применение зонда при нарушении целостности конечной (стерилизационной) упаковки.

Недопустимо применение зонда при превышении срока годности, указанного на упаковке.

Применять зонд необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

Забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения:

1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.

2. Ввести зонд в уретру и выполнить 1 – 3 оборота по и против часовой стрелки.

3. Собранный на рабочей части зонда материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.

4. Использованный зонд после дезинфекции подлежит утилизации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com

ЗАО "Медицинское предприятие Симург"

пр-т Людникова, 13-413, г. Витебск,

Республика Беларусь, 210023, тел.: +375 (212) 62-32-33