

# Руководство по эксплуатации Зонд аспирационный «Юнона» Classic, зонд аспирационный «Юнона» Profi

## Описание

Зонд состоит из гибкой полимерной трубки, внутри которой размещен поршень, снабженный ручкой. Поршень установлен в трубке с возможностью осевого перемещения. Полному извлечению поршня из трубки препятствует стопор на ее проксимальном конце. Длина инструмента – 300 мм, диаметр трубки – 3,0 мм. На дистальном, атравматически закругленном, конце трубки выполнены отверстия. В зонде аспирационном «Юнона» Classic поршень изготовлен из полимера, в зонде аспирационном «Юнона» Profi – из стальной проволоки. Это обеспечивает различную жесткость инструментов и позволяет применять зонды аспирационные «Юнона» для забора материала из полости матки при нормальном («Юнона» Classic) и при стенозированном («Юнона» Profi) цервикальном канале.

Забор материала аспирационными зондами «Юнона» Classic и «Юнона» Profi происходит за счет разрежения, которое создается в трубке при извлечении из нее поршня.

## Показания

Забор материала для цитологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия.

## Противопоказания:

- беременность;
- анатомические особенности пациентки, препятствующие выполнению манипуляции;
- острый, подострый воспалительный процесс гениталий;
- обострение хронического воспалительного процесса гениталий.

## Предостережения:

- недопустимо повторное применение инструмента;
- инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту;
- недопустимо применение инструмента при нарушении упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке или этикетке.

## Рекомендуемая методика применения


Выполнение забора материала с помощью зондов аспирационных «Юнона» Classic и «Юнона» Profi производится с соблюдением общепринятых правил асептики подготовленным медицинским персоналом.

## Подготовка к выполнению манипуляции:

1. Наружные половые органы, влагалище и шейку матки обработать раствором антисептика.
2. Шейку матки «обнажить» в зеркалах, при необходимости фиксировать за переднюю или заднюю губу.
3. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.  
В большинстве случаев дополнительное расширение цервикального канала и обезболивание не требуется.

## Рекомендуемая техника выполнения манипуляции:

1. Зонд аспирационный ввести через цервикальный канал в полость матки до контакта с ее дном (до упора).
2. Быстро и резко извлечь поршень из трубки до стопора. При этом в трубке создается разрежение, за счет которого происходит забор материала.
3. Для того, чтобы собрать большее количество материала, рекомендуется, вращая зонд, выполнить несколько «скользящих» движений трубкой по передней, задней и боковым стенкам матки.
4. Извлечь зонд.
5. Собранный в трубке материал «выдавить» поршнем на предметное стекло или в транспортную емкость.
6. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации согласно Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14.

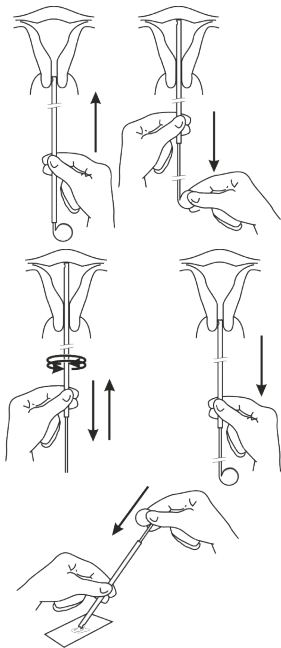

## Изготовитель

ЗАО «Медицинское предприятие Сатург»,  
Республика Беларусь, 210023, г. Витебск,  
проспект Генерала Лядникова, 13-413,  
тел.: +375 (212) 62-32-33  
www.simurg-mp.com  
Изготовлено в Республике Беларусь



Медицинское предприятие

**Сатург**

www.simurg-mp.com

Дата пересмотра текста: 23.07.2019  
0241404801088