

# ВУ Руководство по эксплуатации

## Зонд «Юнона»: цитощетка с цервикальной щеткой

**Описание:** зонд состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки: цервикальная щетка и цитощетка. Цервикальная щетка, выполнена в виде множества параллельных ручке гибких пластиковых щетинок различной длины. Цитощетка представляет собой стержень с множеством эластичных щетинок, расположенных по винтовой линии перпендикулярно оси стержня. Насадка зонда – цитощетка применяется для забора материала из цервикального канала, насадка зонда – цервикальная щетка применяется для забора материала (мазок) со слизистой шейки матки или влагалища. Зонд поставляется стерильным и готовым к использованию.

**Показания:** забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований.

**Противопоказания:** не имеется.

**Предостережения:** недопустимо повторное применение зонда.

Недопустимо применение зонда при нарушении целостности конечной (стерилизационной) упаковки.

Недопустимо применение зонда при превышении срока годности, указанного на упаковке.


Применять зонд необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

### Методика применения:

Забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.


Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
2. Слегка прижав цервикальную щетку к слизистой шейки матки или влагалища выполнить 1 – 3 оборота.

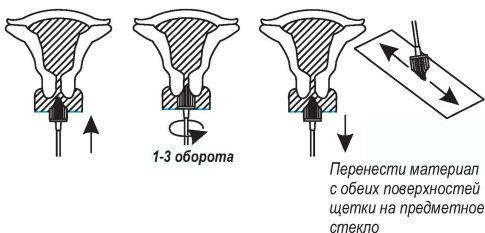

3. Затем ввести в цервикальный канал цитощетку и выполнить один оборот.

4. Собранный на рабочих частях зонда материал перенести на предметное стекло или на среду для микробиологических исследований.

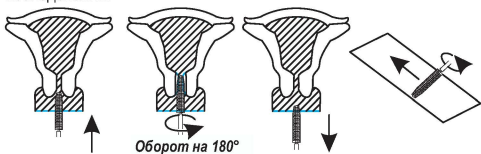

5. Использованный зонд после дезинфекции подлежит утилизации.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО "Медицинское предприятие Симураг",  
проспект Лядникова, д. 13, г. Витебск,  
Республика Беларусь, 210023,  
тел.: +375(212) 62-32-33



Медицинское предприятие

**Симураг**

www.simurg-mp.com